



## Návod ako si aktualizovať zariadenie Accu-Chek Smart Pix

1. Nainštalujte si aplikáciu Accu-Chek Smart Pix
2. Spustite aplikáciu Accu-Chek Smart Pix
3. Pripojte zariadenie Accu-Chek Smart Pix cez USB port počítača
4. Kliknite na Nástroje a Aktualizácia zariadenia Accu-Chek Smart Pix

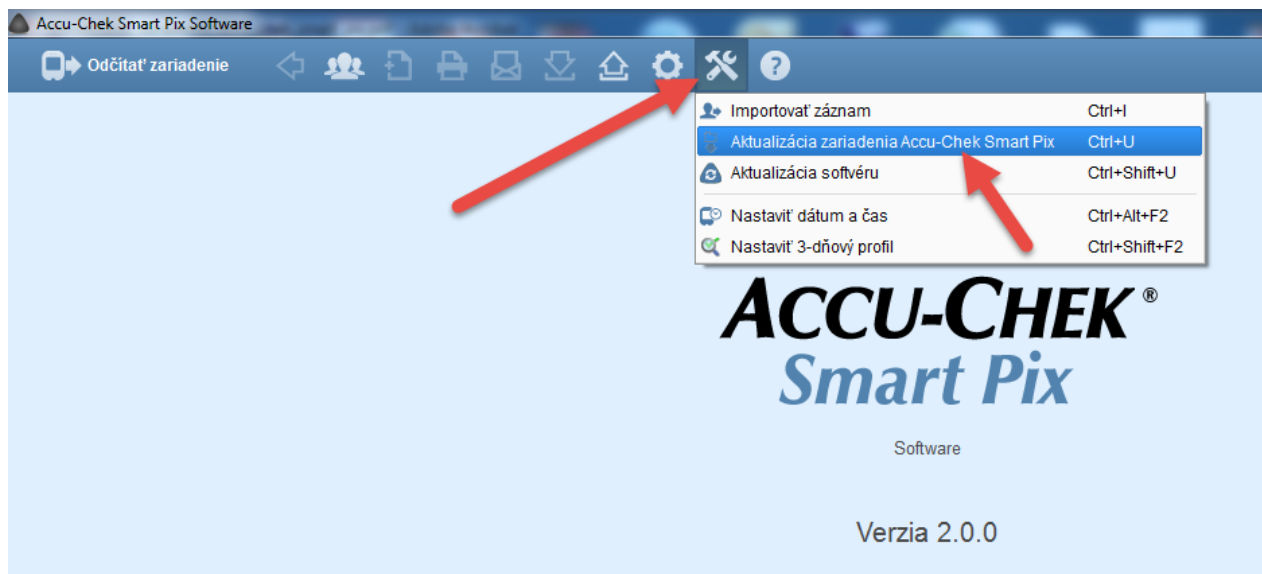


5. Vyberte súbor SIUpdate\_V3\_05\_01.slu (nájdete ho v priečinku, kde máte nainštalovanú aplikáciu Accu-Chek Smart Pix v priečinku update) a kliknite na Otvoriť

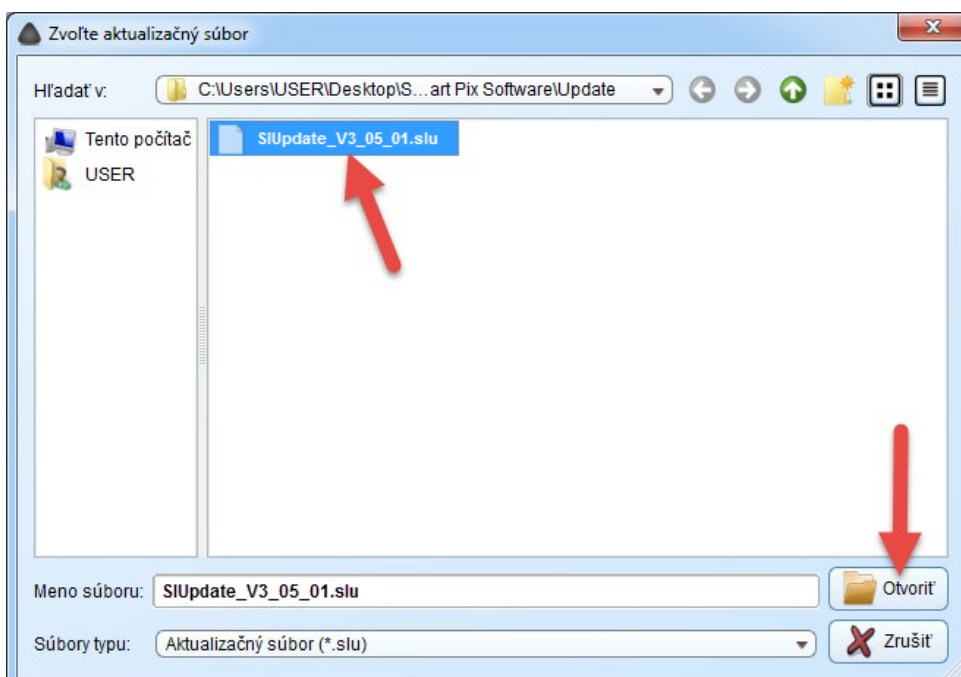

6. Zobrazí sa okno, kde vidíte informáciu o aktualizácií.



7. Po úspešnej aktualizácií sa zobrazí nasledujúce okno

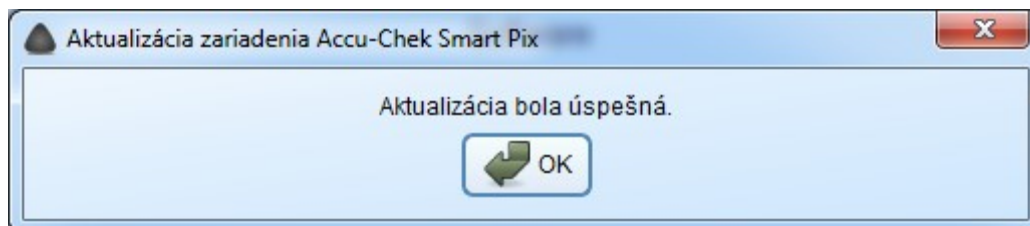

8. Kliknite na OK